

コウノトリヒーター

使用手順書

0. 準備→事前にモバイルバッテリーを十分に充電しておいてください。
1. 滅菌コンテナに精液を採取後、しっかりと蓋を閉める。
2. 交換トレイに滅菌コンテナを収納、蓋を閉める。
3. コウノトリヒーターから出ている黒いコードをモバイルバッテリーに接続する。
4. 2をコウノトリヒーターに入れ、蓋を閉める。
5. モバイルバッテリーのスイッチを入れる。コウノトリヒーターの電源ランプ（青）が点灯します。



Check Point

ヒーター稼働時は、電源ランプ(青)の横にある赤いランプが点灯します。

※ ヒーターは 20℃以下になると稼働します。



○スイッチ位置

