

保冷バッグの使用方法

- (1) 前日の準備(移送開始12時間以上前)：
- ① 冷凍庫（約-20℃）に保冷剤4枚を投入し、凍結させる。
 - ② 冷蔵庫（2～8℃）に、**バイアルホルダーを中にセットし上蓋を閉めたアルミ内箱を投入し、予冷する。**



- (2) 移送**30分前**(時間厳守)：**必ず実施のこと**(バイアル再凍結を防止)
 冷凍庫から、保冷剤4枚を取り出して、**常温環境(15℃～25℃)に置いておく。**

- (3) 移送直前：以下の手順でセッティングを行う。
- ① 保冷剤1枚を保冷バッグの床面に置く。
 - ② 冷蔵庫からアルミ内箱（バイアルホルダー入）を取り出して、①の保冷剤の上に置く。
 - ③ アルミ内箱の上蓋を開けて、ワクチンをディープフリーザーからバイアルホルダーへ速やかに移し、アルミ内箱の上蓋を閉める。
 - ④ 保冷剤2枚をアルミ内箱の両脇に差し込む。
 - ⑤ 上蓋を閉めたアルミ内箱の上に最後の保冷剤1枚を置く。
 - ⑥ 発砲スチロールの蓋を閉め、保冷バッグの蓋を閉める。



保冷バッグ



アルミ内箱



バイアルホルダー
(バイアルはダミー)



保冷剤
(3℃融点保冷剤)



前日の準備



移送30分前



①



④



⑤

