

2022/2/7

モデルナ用バイアルホルダ SBE-VB-VHM をお使いの皆様

株式会社スギヤマゲン  
品質管理室

## バイアルホルダの形状について

2022年2月に入ってから、弊社 SBE-VB-VHM の穴の径が少し小さいのではないかとの問い合わせを、頂いております。

本製品は、厚生労働省様より自治体様向けに発出されている資料にある、モデルナ社のバイアルサイズは直径 24mm との記載から、穴の径を決めております。当初直径 25mm で試作を行いましたが、バイアルが抜ける可能性があるとのことで直径 24mm へ変更し 2021 年 6 月に上市させて頂いております。

この度弊社所在の近隣の自治体様のご協力を頂き、実際の使用済みバイアルを用いた試験を行いました。その結果、抜き差しは可能であるものの、穴の径がバイアルに対し若干細かい箇所があることが判明しました。

取り出しに難があります場合には、以下の対応をお勧めいたします。

バイアルを差し込む穴と穴の間をカッターで切断する。切断する深さは、1.5cm 程度(スポンジの高さの半分くらい)になります。



お忙しい中お手数おかけし申し訳ありません。

以上 よろしく願いいたします。