

BARIAPOUCH®用 吸水バッグ、吸水シート、吸水材



BRP-AB3-N



BRP-AB6-B



BRP-ABS



BRP-ABF

品名	品番	仕様	入数	価格
吸水バッグ	BRP-AB3-N	15cc試験管が3本収納できるポケット付 寸法(mm):123×180	20枚	1,800円
吸水バッグ6連	BRP-AB6-B	15cc試験管が6本収納できるポケット付 寸法(mm):123×318	20枚	2,400円
吸水シート	BRP-ABS	寸法(mm):250×330	20枚	2,300円
吸水材	BRP-ABF	寸法(mm):70×100	100包	4,400円

ラベルシール



	品名	品番	サイズ(mm)	入数	価格
①	セキュリティラベル(銀)	SPL-S-03	34×75	20枚	1,200円
②	オーバーバックラベル	—	100×50	20枚	1,000円
③	ドライアイス(クラス9)ラベル(大)	SPL-D-02	102×102	30枚	1,200円
④	ウイルスを移しやすい物質(クラス6)ラベル(大)	SPL-AL-01	100×100	15枚	750円
⑤		SPL-AL-02		60枚	2,700円
⑥	ウイルスを移しやすい物質(クラス6)ラベル(小)	SPL-AS-01	58×84	15枚	750円
⑦		SPL-AS-02		50枚	2,250円
⑧	UN3373 ラベル(大)	SPL-BL-01	100×138	15枚	825円
⑨		SPL-BL-02		60枚	3,000円
⑩	UN3373 ラベル(小)	SPL-BS-01	58×89	15枚	750円
⑪		SPL-BS-02		50枚	2,250円
⑫	セキュリティラベル(青)	SPL-S-01	50×76	15枚	750円
⑬		SPL-S-02		50枚	2,250円

【圧力試験写真】



圧力試験写真(AT.55℃ 95kPa)



圧力試験写真(AT.-40℃ 95kPa)

- 価格は全て税抜です。
- 価格・仕様は予告なく変更することがあります。

感染性物質輸送容器

BARIAPOUCH® BARIABOX®

バリアパウチ／バリアボックス



カテゴリ-B (UN3373) 対応検体輸送容器



「IATA包装基準650 (PI650) 適合」*

バリアパウチは臨床検体や治験検体を安全に輸送できる95kPa耐圧パウチです。

*IATA=国際航空運送協会・International Air Transportation Associationの略

BARRIAPOUCH®

バリアパウチ


- カテゴリーBの病原体、臨床検体、治験検体が安全に輸送できる耐圧パウチ袋(2次容器)です。
- -40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧をかけてもリークが発生しません。
- 高い耐圧性能は、特許取得の逆止弁方式により実現しています。
- 逆止弁方式とは、パウチ内面にフラップシートを設け1次容器収納後フラップシートはシールされます。密着したフラップシートはパウチ内部に圧力が加わるとその内圧に同調してシール強度が増す構造で高い耐圧性能を実現しています。
- フィルム材質の工夫により、高温領域でも低温領域でも耐圧性能を保持しています。
- その耐圧性能は日本国内及び海外の第三者機関で試験・実証済みです。[IATA包装基準650 (PI650) 適合]
- 取得済特許 (Japan Patent No.4590024 / U.S.A. Patent No.8,167,489B2 / EU Patent No.2399838 / China Patent No.2L201110171829.4)
- 当社商品の外装容器「BARRIABOX (バリアボックス)」と組み合わせるとIATAの包装基準650 (PI650) に適合した三重包装梱包としてカテゴリーB (UN3373) の航空輸送が可能です。



特徴




有効内容積UP
ジッパー採用で20%UP

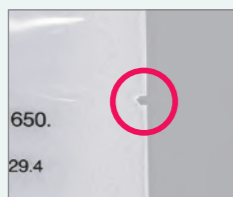

取出しやすい
側面に切り込み



伝えやすい
背面に書類ポケット

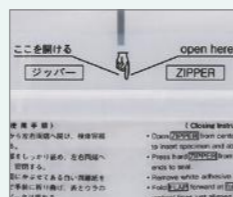

分かりやすい
日本語の手順併記



QRコード
取扱手順動画

BARRIABOX®

バリアボックス

- カテゴリーB (UN3373) の輸送はIATA包装基準650 (PI650) より1次容器、2次容器の内装容器と外装容器で構成されることとなっています。
- バリアボックスは、耐水性・堅牢性に優れたカテゴリーB (UN3373) の感染性物質輸送用の外装容器です。
- 第三者試験機関にて降雨試験、落下試験 [IATA包装基準650 (PI650) 適合] を実施・証明済みです。



【常温輸送】【少量用】

容易に組立可能な、コンパクトタイプ。常温輸送用。


	品名	BARRIABOX5 (バリアボックス5)
	品番	BRB5
	商品構成	外装容器(紙製)×20/セキュリティラベル×20
	サイズ	外寸(mm):200×120×H30 内寸(mm):196×110×H27
	収納容量	15cc試験管×3本
価格	8,800円	


	品名	BARRIABOX200 (バリアボックス200)
	品番	BRB-200
	商品構成	外装容器(紙製)×10/セキュリティラベル×10/緩衝材×20
	サイズ	外寸(mm):255×160×H47 内寸(mm):242×152×H46
	収納容量	15ml遠心管×10本 または 50ml遠心管×4本程度
価格	6,600円	


	品名	BARRIABOX450 (バリアボックス450)
	品番	BRB-450
	商品構成	外装容器(紙製)×10/セキュリティラベル×10/緩衝材×20
	サイズ	外寸(mm):290×185×H95 内寸(mm):260×180×H90
	収納容量	15cc試験管×18本
価格	16,500円	

【保冷輸送】

保冷輸送用として折り畳み可能な、断熱性能に優れた発泡断熱材を使用しています。ドライアイス6.9kg入れると-20℃以下を72時間以上維持できます。(ドライアイス6.9kgの場合、15cc試験管を15本位まで収納可能。) 又、カテゴリーA (UN2814/UN2900) 及びカテゴリーB (UN3373) のオーバーパックとしてご使用いただけます。

	品名	BARRIABOX1000 (バリアボックス1000)
	品番	BRB1000
	商品構成	外装容器(紙製)×1/断熱材×1式/パウチ保護用内箱×1 ラベル4種類 [UN3373ラベル(大)、セキュリティラベル、オーバーパックラベル、ドライアイ斯拉ベル]
	サイズ	外寸(mm):345×310×H310 内寸(mm):255×220×H180
	価格	7,700円

	品名	BARRIAPOUCH A5R (バリアパウチA5R)
	品番	BRP-A5R
	サイズ	パウチ外寸(mm):250×185 パウチ有効内寸(mm):190×155
	商品構成	BARRIAPOUCH A5R 本体×20枚
	適合するBARRIABOX	BRB5、BRB-200、BRB-450、BRB1000
	価格	5,600円

	品名	BARRIAPOUCH B4R (バリアパウチB4R)
	品番	BRP-B4R
	サイズ	パウチ外寸(mm):385×270 パウチ有効内寸(mm):260×240
	商品構成	BARRIAPOUCH B4R 本体×20枚
	適合するBARRIABOX	BRB-450、BRB1000
	価格	8,400円

* BARRIAPOUCHは、吸水バッグ/吸水シート/吸水材/BARRIABOXと組み合わせてご使用ください。