

～尿と混ざらず、便だけ捕捉でき、楽に採便できる～

# 採便キット

一連の流れで便を採取できるよう、ベンキャッチ（採便シート）と採便コンテナがセットになった採便キットです。これまで採便しづらかった水様便（下痢便）にも対応しています。



衛生的、かつ、正確な採便が可能のため、検体検査の質が向上します。わずらわしい採便作業を簡単にし、便水に浸からないので確実な採便ができるキットです。  
水流で流せる紙を採用しているため、使用後はそのまま便器で流すことができます。

品番	品名	入数	素材	価格
BS-01	採便キット	ベンキャッチ 採便コンテナ 各1 / 袋 × 100 セット入	ベンキャッチ：水解紙 採便コンテナ：PP/HD-PE	22,000 円 (税別)

## ベンキャッチの特徴

- 1 中空構造のため尿やトイレの水と混ざらない。
- 2 立体形状のため、どのような便でもそのまま捕捉できる。
- 3 両面テープで便座の中央に固定できるので通常の姿勢で排便できる。
- 4 水解紙のため採便後トイレにそのまま流せる。




## 採便コンテナの特徴

- 1 フタとスコップが一体化しているためゴミなどが出ない
- 2 水様便でも取りやすい
- 3 スクリューキャップのためもれない
- 4 便利なラベル付

# 使用方法

## STEP 1 | 準備


裏面にある両面テープの剥離紙を剥がして下さい。

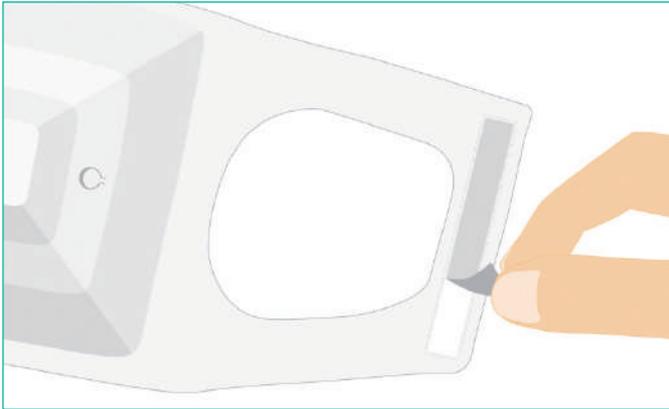

※剥離紙はトイレに流せません。

## STEP 2 | 設置


便座を上げて、便器のふちに貼り付けます。

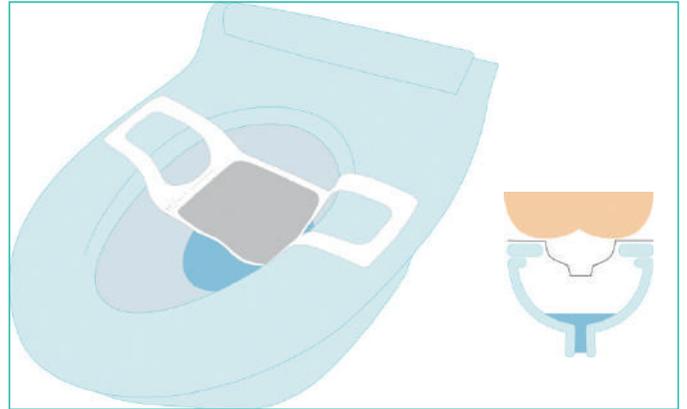

※設置してから形を整えて下さい。

## STEP 3 | 採便

用便後、便を採取して下さい。

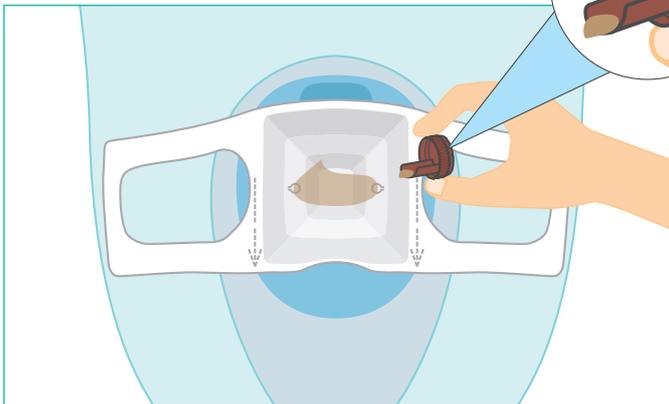

※水様便の場合はスコップで液体をすくって下さい。

## STEP 4 | 排水

便座からはがし、トイレに流して下さい。



※便座からはがす際は、両面テープが残らないようにゆっくりとはがして下さい。急にはがすと採便シートの破れや糊残りの原因になります。

# 個別販売

ベンキャッチ	品番	材質	包装単位	価格 (円/税別)
	B-01	水解紙	1枚包装×50袋/ケース	10,000
	B-200		200枚/ケース	26,000

採便コンテナ	品番	容量	高さ/φ	数量	包装単位	価格 (円/税別)
	SG-4299.720	70mℓ	55/44mm	500個	50個	55,900
	SG-4299.720J			100個	//	13,100



株式会社スギヤマゲン

since 1932

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-9  
 TEL : 03-3814-0285 FAX : 03-3815-3045  
<http://www.sugiyama-gen.co.jp>