


オプティスワブトランスポート・システム使用方法

①




「OPEN HERE」と印刷されているパウチ先端部分より包装を剥がして下さい。

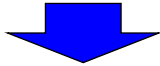

②




中のスワブと輸送用チューブを取り出します。この時、スワブ先端を触ったり、環境表面に触れさせることのないように無菌的に操作を行って下さい。

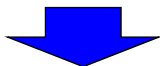

③




スワブ先端部で検体を採取します。その際、検体採取面を傷つけることのないよう、スワブ軸に過度の力をかけないように注意して下さい。

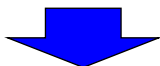

④




輸送用チューブのスクリュー・キャップを開けます。輸送用チューブ内の液相培地がこぼれないように、チューブは垂直に保つようにして下さい。

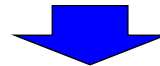

⑤




スワブを輸送用チューブに入れます。その際、スワブ先端をチューブ外側等に触れさせないように注意して下さい

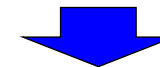

⑥



スワブを輸送用チューブの内側に押し付けるようにして、スワブ軸にあるブレイクポイントで注意深く折ります。（※注意：慣れるまでは、チューブを掴んでいる手を机などに固定して作業して下さい。）

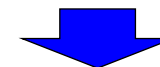

⑦



スクリュー・キャップを、中身が漏れないようにしっかり締めます。