
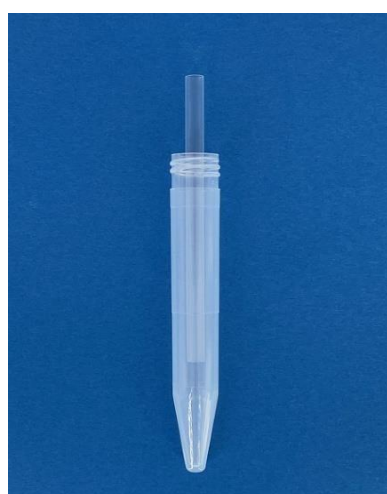


# 唾液採取セット ストロー入

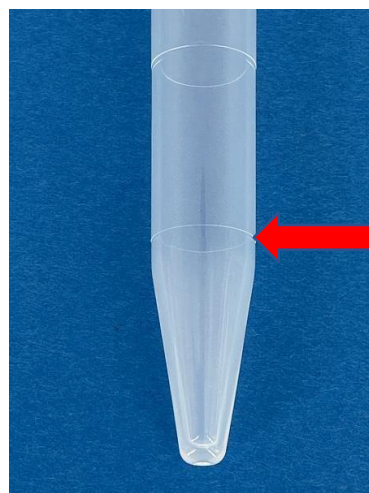

- 試験管サイズ：16φ×108mm
- ストローサイズ：6φ×95mm
- 材質：ポリプロピレン(P P)
- 滅菌方法：電子線滅菌(E B)
- 試験管の目盛り：1.5ml 5ml 9ml 10ml

## ご使用方法

- 1.袋を切込みに沿って開封してください。
- 2.試験管のキャップを開けストローを取出してください。
- 3.口腔内に唾液を溜め、ストローを使って試験管に注入してください。

コロナ検査に必要な唾液量は1mL～2mLです。試験管下部の**目盛り1.5mLまで**出してください。

- 4.規定量の唾液を出したら、二次感染を防ぐため使用したストローは元の試験管に戻して、キャップを最後までしっかり閉め、絶対に漏れない様にしてください。

品番	商品名	注文単位
SG-915	唾液採取セット滅菌(ストロー)入	500個/個包装



株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9 TEL：03-3814-0285 FAX：03-3815-3045  
E-mail：mail@sugiyama-gen.co.jp URL：http://www.sugiyama-gen.co.jp